

# Réglage de l'heure

## ⚠ AVERTISSEMENT

Il est important de régler l'heure et la date correctes sur la pompe y compris les indications a.m. et p.m. pour le format 12 heures. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir la bonne quantité d'insuline au bon moment.

**1**



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Heure et date**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer la sélection.

**2**



L'écran **Heure et date** s'affiche.

Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Heure**.

**3**



L'écran **Heure** s'affiche avec le champ des heures mis en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure.

Appuyez sur la touche **OK**.

**4**



Le champ des minutes est mis en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler les minutes.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

# Réglage de la date

**1**



Dans le menu **Réglages**, appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Heure et date**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer la sélection.

**2**



L'écran **Heure et date** s'affiche.

Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à l'option **Date**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer la sélection.

**3**



L'écran **Date** s'affiche avec le champ de l'année mis en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année.

Appuyez sur la touche **OK**.

**4**



Le champ du mois est mis en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le mois.

Appuyez sur la touche **OK**.

**5**



Le champ du jour est mis en surbrillance.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour régler le jour.

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.