


3.1. Régler l'heure et la date

Régler correctement la date et l'heure est nécessaire pour l'administration précise de l'insuline basale et pour un enregistrement précis de toutes les administrations d'insuline.

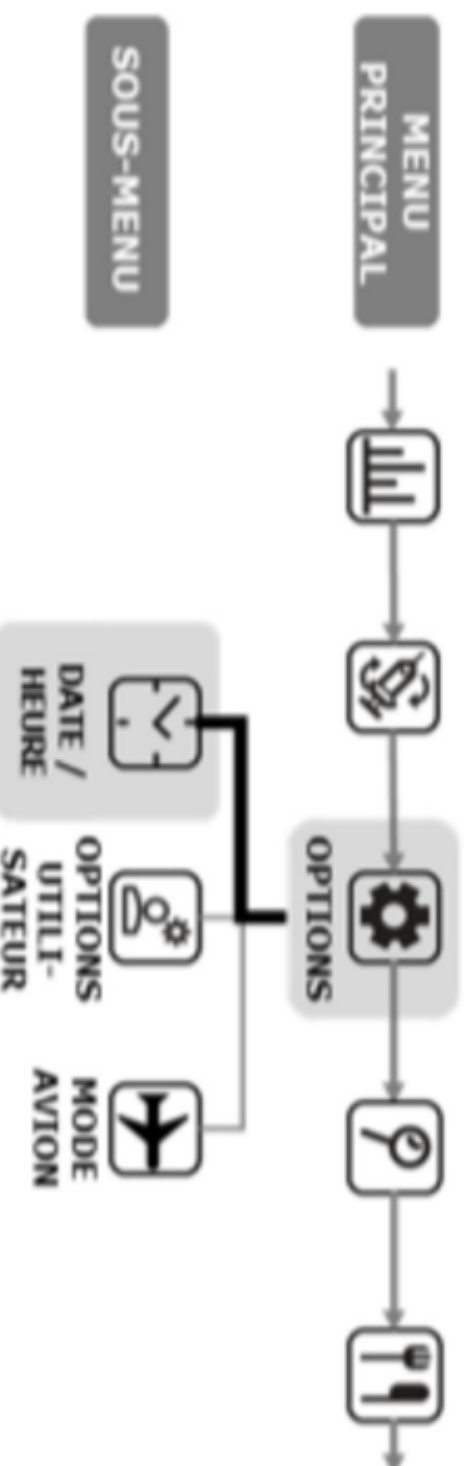

MENU PRINC. OPTIONS	1. Sélectionner OPTIONS dans le menu principal et appuyer sur <input type="button" value="OK"/> .
OPTIONS DATE/HEURE	2. Sélectionner DATE/HEURE puis appuyer sur <input type="button" value="OK"/> .
DATE/HEURE 03/10/2017 10:04AM	3. Utiliser <input type="button" value="+"/> pour alterner entre mois, jour, heure et minute. Utiliser <input type="button" value="+"/> et <input type="button" value="-"/> pour effectuer les modifications. Attention S'assurer que « AM » et « PM » sont correctement réglés, si l'horloge est au format « 12 heures ».
SAUVEGARDER REGLAGES ? <input type="button" value="NON"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="OUI"/>	4. Après le réglage, appuyer sur <input type="button" value="OK"/> pour sauvegarder.

Remarque Pour choisir le format d'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures, voir chapitre 3.4 « Régler les options utilisateur ».