


Heure et format d'heure

Attention : Veillez à régler l'heure correctement. Le réglage de l'heure affecte le fonctionnement de plusieurs fonctionnalités du système Omnipod DASH™.

Pour modifier l'heure :

1. Accédez à : Icône Réglages () > Appareil PDM > Heure.
2. Pour changer de format d'heure, appuyez sur le bouton à bascule afin de sélectionner le format 24 h ou le format 12 h (AM/PM).
3. Pour modifier l'heure :
 - a. Si vous avez un Pod actif, appuyez sur **SUSPENDRE L'ADMINISTRATION D'INSULINE**, puis sur **OUI**.
 - b. Faites défiler les champs Heure et Minute sur les valeurs souhaitées. Si vous avez opté pour le format 12 h, sélectionnez AM ou PM.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER**, puis sur **CONFIRMER**.
5. Si vous aviez suspendu l'administration d'insuline, appuyez sur **OUI** pour reprendre l'administration d'insuline.