

Programmation de base


Réglage de l'heure et de la date

Il est nécessaire de régler correctement la date et l'heure de la pompe pour administrer et enregistrer des doses d'insuline précises et assurer un bon fonctionnement de la pompe. Il est possible de sélectionner un format d'horloge de 12 ou de 24 heures. L'heure et la date doivent être réinitialisées lorsque l'alarme VERIF REGLAGES retentit ou lorsque la fonction Effacer réglages est activée.

- 1 Allez à l'écran TIME/DATE SETUP (REGLAGE HEURE/DATE).
Main > Utilities > Time/Date (Menu principal > Fonctions > Heure/Date)



- 2 Sélectionnez 12-Hour Setup (Réglage 12 heures) ou 24-Hour Setup (Réglage 24 heures) et appuyez sur ACT.

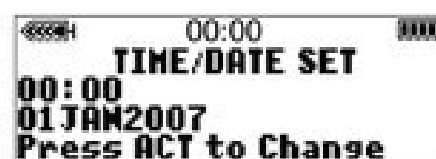

- 3 Appuyez à nouveau sur ACT pour modifier les réglages.

- 4 Modifiez chacun des réglages comme suit :
 - a. Hour (l'heure)

Modifiez l'heure. Appuyez sur ACT.



Pour le réglage 12 heures, appuyez sur ∇ ou sur \blacktriangle jusqu'à ce que le symbole approprié A (matin) ou P (soir) apparaisse.


- b. Minutes

Modifiez les minutes. Appuyez sur ACT.



- c. Year (Année)

Modifiez l'année. Appuyez sur ACT.

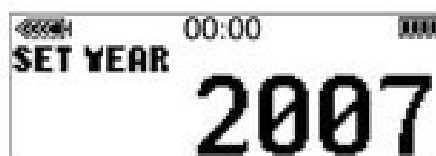

- d. Month (Mois)

Modifiez le mois. Appuyez sur ACT.




- e. Day (Jour)

Modifiez le jour. Appuyez sur ACT.



- 5 L'écran TIME SET AT (POMPE REGLEE A) affiche les réglages programmés. Appuyez sur ACT et quittez les menus. Les réglages de l'heure et de la date sont terminés.

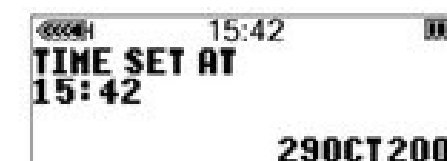

Sélection de la langue

La langue du texte affiché à l'écran peut être modifiée. Certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les pompes. Avant de pouvoir sélectionner une autre langue, vous devez régler l'heure à l'aide des écrans en anglais. Consultez la section précédente.

Pour modifier la langue du texte affiché à l'écran :

- 1 Accédez à l'écran LANGUAGE MENU (CHOIX DE LA LANGUE).
Main > Utilities > Language (Menu principal > Fonctions > Langue)



- 2 Sélectionnez la langue et appuyez sur ACT.



- 3 La langue est désormais modifiée. Patientez quelques secondes pour que la nouvelle langue s'affiche à l'écran. Quittez les menus.

Bolus

Il existe trois types de bolus : le bolus normal, le bolus carré (Square Wave®) et le bolus duo (Dual Wave®). Cette section comporte les instructions pour l'administration d'un bolus normal à l'aide de la touche raccourci BOLUS DIRECT et en naviguant à travers les menus. (Pour des informations sur les bolus carré et duo, reportez-vous au chapitre *Optimisation du traitement par pompe*.)