

Réglage de l'heure et de la date

Il est indispensable de régler l'heure et la date correctement, les débits de base et les historiques étant sauvegardés sur cette base dans la pompe. En cas de changement de fuseau horaire, assurez-vous de modifier ces réglages en conséquence.

Pour l'indication de l'heure, le système offre le choix entre un format 12 heures et un format 24 heures.

Format 12 heures	Format 24 heures
Horloge sur 12 heures	Horloge sur 24 heures
mois/jour/année	jour/mois/année

AVERTISSEMENT

Un réglage incorrect de l'heure et de la date peut conduire à une administration inadaptée de l'insuline de base. Assurez-vous que l'heure et la date de la pompe à insuline sont justes afin de garantir l'administration correcte d'insuline et la mise en mémoire des données. Ne prenez pas de décisions liées au traitement à partir d'un seul résultat de la mémoire de la pompe.

AVERTISSEMENT

De plus, si la consultation de vos données (par vous-même, le médecin ou le personnel de santé chargé de votre suivi) s'effectue à l'aide d'un PC ou d'un ordinateur de poche, il est capital que vous synchronisiez la pompe avec ces appareils. Les données risqueraient de perdre leur sens en l'absence de synchronisation. Assurez-vous que ces appareils restent synchronisés en les vérifiant régulièrement.



1. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran RÉGLAGE DATE ET HEURE.

Appuyez sur la touche  pour le sélectionner.




2. L'écran HEURE s'affiche.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler l'heure.




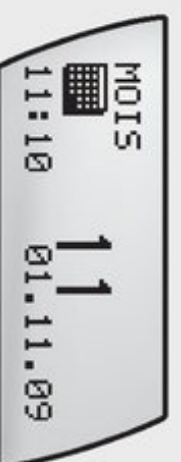
3. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran MINUTES.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler les minutes.

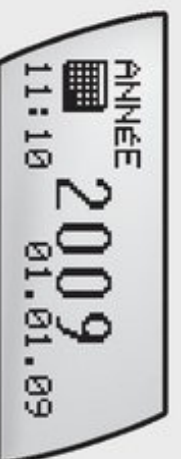


4. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran ANNÉE.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler l'année.


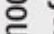


5. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran MOIS.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler le mois.



6. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran JOUR.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler le jour.



7. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran FORMAT HEURE.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler le format de l'heure.



8. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran FORMAT DATE.

Appuyez sur la touche  ou la touche  pour régler le format de la date.

Appuyez sur la touche  pour enregistrer et quitter.