


Réglage du format de l'heure, de l'heure et de la date

i REMARQUES :

- Il est conseillé de régler la date et l'heure sur la pompe (ce réglage entraîne la modification automatique du lecteur afin que le lecteur et la pompe soient synchronisés).
- Un changement de date et d'heure aura une incidence sur le graphique d'évolution et sur le tableau d'évolution (voir « Affichage des évolutions » au paragraphe 4.4, « Rapports »).
- Dans un format 24 heures, l'heure est affichée suivant le modèle « HH:MM » (exemple : 15:53) où « H » représente l'heure et « M » les minutes, et dans un format 12 heures l'heure est affichée suivant le modèle « HH:MM M/AM ».
- La date est affichée suivant le modèle « JJ MMM AA » (exemple : 02 Fév 08) où « J » représente le jour, « M » le mois et « A » l'année.

Menu principal > Réglages > Heure/Date


1.



10:02 2 Fév 08
Mesure glycémie
Conseil bolus
Pompe
Mes données
Réglages

▶ À partir du menu principal, sélectionnez Réglages et appuyez sur la touche .


2.



10:02 2 Fév 08
Rappels
Conseil bolus
Lecteur
Son/Vibreur
Heure/Date
Plages horaires
Menu

▶ Sélectionnez Heure/Date et appuyez sur la touche .

3.



Heure/Date
Format de l'heure 24 h
Heure 10:00
Date 2 Fév 08

Annuler Enregistrer

Comment modifier le format de l'heure :

▶ Sélectionnez le champ Format de l'heure et appuyez sur la touche .

▶ Sélectionnez 12 h ou 24 h et appuyez sur la touche .

Comment modifier l'heure :

▶ Sélectionnez le champ Heure et appuyez sur la touche .

▶ Réglez l'heure et appuyez sur la touche .

▶ Réglez les minutes et appuyez sur la touche .

▶ Si vous avez sélectionné l'horloge 12 h, sélectionnez « am » ou « pm » et appuyez sur la touche .

Pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Réglages, sélectionnez Enregistrer.

Comment modifier la date :

▶ Sélectionnez le champ Date et appuyez sur la touche .

▶ Saisissez le jour et appuyez sur la touche .

▶ Saisissez le mois et appuyez sur la touche .

▶ Saisissez l'année et appuyez sur la touche .