








## VERROUILLAGE DU CLAVIER

La pompe **CRONO PAR** a 2 configurations d'accès aux fonctions :

- **L0 (déverrouillée)** : dans cette configuration, le clavier permet l'accès complet à la configuration des paramètres et au contrôle des fonctions opérationnelles ;
  - **L1 (verrouillée)** : dans cette configuration, le clavier permet le contrôle des fonctions opérationnelles mais non la configuration des paramètres à l'exception de l'heure et des minutes ; lorsque **L1** a été sélectionné, l'écran affiche le symbole de cadenas (symbole  allumé).
- Avant de procéder à la configuration de la pompe, s'assurer que le niveau d'accès sélectionné est **L0** (symbole  éteint).

Pour verrouiller/déverrouiller le clavier, procéder de la manière suivante :

1. la pompe étant sur **OFF** ou sur **StoP** appuyer sur la touche  pendant 6 secondes environ : l'écran affiche le nombre de doses bolus distribuées pendant la dernière perfusion suivi par le nombre de perfusions complètes pratiquées ;
2. sans relâcher la touche , appuyer également sur la touche  : l'écran affiche **L0** ou **L1**, avec **0** ou **1** clignotants ;
3. maintenant il est possible de sélectionner le niveau de verrouillage du clavier en agissant sur les touches  ou sur .








## RECOMMANDATIONS



- Le niveau de configuration d'accès aux fonctions (**L0** et **L1**) reste en mémoire même lorsque la batterie est déposée.
- Lorsque le clavier est en mode **L1** (verrouillé) à toute tentative d'accès aux opérations protégées, le dispositif émet un signal sonore intermittent et l'écran affiche le symbole de cadenas clignotant.

### PROGRAMMATION DES HEURES ET DES MINUTES



La procédure est la suivante :

1. La pompe étant sur **OFF** ou sur **StoP** appuyer sur la touche  pendant 4 secondes environ : l'heure clignote à l'écran ;
2. Appuyer sur la touche  pour diminuer les heures ; appuyer sur la touche  pour les augmenter. Chaque variation est suivie par un signal sonore bref ;
3. Si au bout de 20 secondes on n'appuie sur aucune touche, la phase de programmation se termine et la valeur à l'écran devient fixe ; ensuite les indications **OFF** ou **StoP** s'affichent à l'écran ;
4. En appuyant sur la touche , avant l'affichage de **OFF** ou de **StoP** (lorsque la valeur de l'heure clignote) le système passe à la programmation des minutes ;
5. Appuyer sur la touche  pour diminuer les minutes ; appuyer sur la touche  pour les augmenter. Chaque variation est suivie par un signal sonore bref ;
6. Si au bout de 20 secondes on n'appuie sur aucune touche, la phase de programmation se termine et la valeur à l'écran devient fixe ; ensuite les indications **OFF** ou **StoP** s'affichent à l'écran ;
7. En appuyant sur la touche , avant l'affichage de **OFF** ou de **StoP** (lorsque la valeur des minutes clignote) le système passe à la programmation du paramètre suivant : **PROGRAMMATION DE LA DOSE BOLUS.**



### REMARQUE



La pression continue sur la touche  ou  permet de modifier rapidement les valeurs de l'heure et des minutes.