

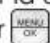






Comment régler la date et l'heure

En modes Auto et Free, la date et l'heure peuvent être affichées lorsque la perfusion est interrompue ou qu'elle n'est pas en cours.

En Mode Free, la date et l'heure peuvent être modifiées lorsque la perfusion est interrompue ou qu'elle n'est pas en cours.

En mode Auto, elles ne peuvent être modifiées que lorsque la perfusion n'est pas en cours.

1. Dans le menu Paramètres, utilisez les touches  et  pour sélectionner la date/l'heure, puis appuyez sur .
2. Le chiffre qui peut être modifié commence à clignoter. Modifiez la valeur avec les touches  et  ; appuyez sur  pour confirmer et passer au chiffre suivant.

Remarque : une fois que la procédure de modification de la date et de l'heure a commencé, elle ne peut pas être terminée prématurément. Faites défiler toutes les valeurs (heures, minutes, jours, mois, années) à l'aide de la touche  pour revenir au menu Paramètres.

Mode Free	Mode Auto
Paramètres	Paramètres
Date/heure	Date/heure
Type de seringue	Type de seringue
Débit	Débits horaires
Dose de bolus	Dose de bolus
Volume partiel	Volume partiel
Alarme de fin de perfusion	Alarme de fin de perfusion
Volume d'amorçage	Volume d'amorçage
Réservé	Réservé
Résolution des problèmes	Résolution des problèmes
Régler l'heure	Régler l'heure
13:16 hh:mm	13:16 hh:mm
:	:
Régler la date	Régler la date
07/11/18 jj/mm/aa	07/11/18 jj/mm/aa