

3.4 DÉMARRAGE OU ARRÊT DE L'ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT

Vous pouvez démarrer et arrêter l'administration du médicament à l'aide des boutons de fonction. Il est nécessaire d'interrompre l'administration uniquement si vous

- remplacez le réservoir
- remplacez le set de perfusion
- remplacez la batterie
- modifiez l'heure
- modifiez les paramètres de délivrance
- souhaitez retirer l'appareil de votre corps.



Démarrage de l'administration du médicament

Sur l'écran principal, appuyez sur **Démarrer**. Maintenez le bouton enfoncé (env. 3 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et ne relâchez le bouton qu'après avoir entendu ce signal.

i Vérifiez de temps en temps, à l'aide la fenêtre d'observation, si le niveau de remplissage du réservoir diminue. Vous pouvez ainsi savoir si l'administration est activée et a bien lieu.



Arrêt de l'administration du médicament

Sur l'écran principal, appuyez sur **Arrêter**. Maintenez le bouton enfoncé (env. 3 secondes) jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et ne relâchez le bouton qu'après avoir entendu ce signal.

i La pompe s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est vide ou en cas de dysfonctionnement. Après une alarme, vous devez chaque fois recommencer l'administration.


5.2.2 RÉGLAGE DE L'HEURE

Arrêt de l'administration du médicament

Ne modifiez le réglage de l'heure que pendant les pauses du traitement. Arrêtez d'abord l'administration.

Chapitre 3.4

1

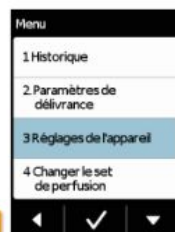

⚠ La modification de l'heure a une influence sur la quantité de médicament du jour en cours. En fonction de la modification, une partie de la quantité quotidienne est répétée ou non administrée.

2



Sélection de la fonction Heure

Dans le menu **Réglages de l'appareil**, sélectionnez **Heure** puis appuyez sur



3



Réglage de l'heure

À l'aide des boutons **-** et **+**, réglez l'heure actuelle puis confirmez en appuyant sur



4



Réglage des minutes

Répétez la procédure pour les minutes de l'heure actuelle puis confirmez en appuyant sur



5



Redémarrage de l'administration du médicament

Le bouton **←** permet d'accéder à l'écran principal. Depuis cet écran, redémarrez l'administration du médicament.

Chapitre 3.4