

Partie IV – Fonctions réservées au personnel médical

Saisie du mot de passe

L'accès aux fonctions réservées au personnel médical n'est possible qu'après la saisie d'un mot de passe.

La pompe SO*CONNECT® affiche le clavier numérique de saisie du mot de passe.

En cas d'erreur de frappe, vous pouvez utiliser le bouton  pour effacer les chiffres.



Après la saisie des 4 chiffres du mot de passe, appuyez sur le bouton OK pour le valider.



Avertissement

- Les professionnels de santé ne doivent pas communiquer au patient le mot de passe, ni toutes autres informations susceptibles de lui permettre d'accéder aux fonctions de programmation et de configuration de la pompe SO*CONNECT®. Suite à une programmation incorrecte, le patient peut subir de graves liaisons.

Paramétrage de la pompe

La pompe SO*CONNECT® vous donne la possibilité de régler plusieurs paramètres :

- l'heure,
- la date,
- le format de la date utilisé pour l'affichage,
- la langue utilisée pour l'affichage.

Vous avez également la possibilité de visualiser la version du logiciel interne de la pompe SO*CONNECT®.



Remarques

- Les différents paramètres de la pompe SO*CONNECT® ne sont pas accessibles pendant une perfusion.
- Le changement d'un des paramètres est pris en compte immédiatement par la pompe SO*CONNECT®.

Partie IV – Fonctions réservées au personnel médical




Le paramétrage de la pompe (date, heure, format de la date, langue) se fait à partir de l'écran général.

Appuyez sur le bouton ☰ pour ouvrir le menu des fonctions complémentaires.

Appuyez sur Paramètres.

La pompe affiche le premier onglet de paramétrage (Heure, Date et Format de la date).


Trois onglets permettent d'accéder aux différents paramètres.

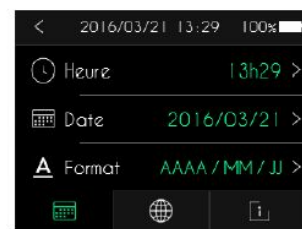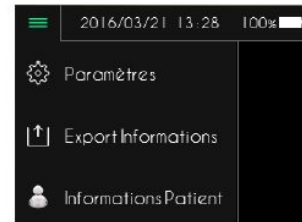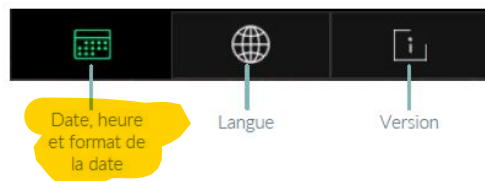

Partie IV – Fonctions réservées au personnel médical


Paramétrage de l'heure

Lorsque la pompe SO[®]CONNECT[®] affiche l'onglet de paramétrage de l'heure, de la date et du format de la date, appuyez sur l'heure pour la modifier.

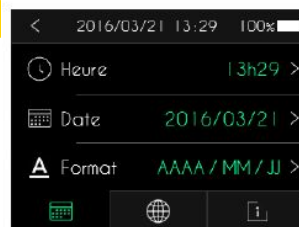

La pompe SO[®]CONNECT[®] affiche le clavier numérique pour saisir la nouvelle heure.

Appuyez sur le bouton < pour valider la nouvelle heure.

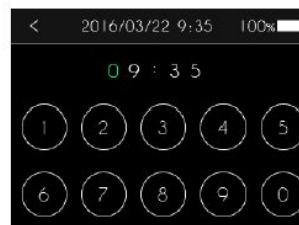

Avertissement

- Il est indispensable de régler correctement l'heure. Les débits et les données cliniques sont gérés à partir de cette information. Un réglage incorrect de l'heure peut conduire à une administration inadaptée d'apomorphine.
- En cas de changement de fuseau horaire ou en cas de changement d'heure assurez-vous de modifier l'heure en conséquence.

Paramétrage du format de la date

Lorsque la pompe SO[®]CONNECT[®] affiche l'onglet de paramétrage de l'heure, de la date et du format de la date, appuyez sur le format de la date pour le modifier.



La pompe SO[®]CONNECT[®] offre la possibilité de choisir entre trois formats pour l'affichage de la date :

- jour / mois / année,
- mois / jour / année,
- année / mois / jour




Appuyez sur le format que vous souhaitez utiliser. Le format sélectionné est affiché en vert.

Appuyez sur le bouton < pour valider le format de la date.

Partie IV – Fonctions réservées au personnel médical


Paramétrage de la date

Lorsque la pompe SO[®]CONNECT[®] affiche l'onglet de paramétrage de l'heure, de la date et du format de la date, appuyez sur la date pour la modifier.

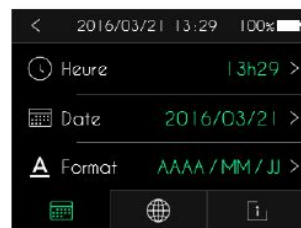

La pompe SO[®]CONNECT[®] affiche un clavier numérique pour saisir la date.

Appuyez sur le bouton < pour valider la nouvelle date.

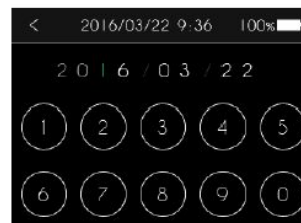

Avertissement

- *Il est indispensable de régler correctement la date. Les données cliniques sont gérées à partir de cette information. En cas de changement de fuseau horaire, assurez-vous de modifier la date en conséquence.*